

## Aspirador de Gases Bhio Supply

Registro ANVISA Nº: 80381210112

Nome Técnico: Aspirador



Antes do uso, leia atentamente as instruções presentes neste manual.



Produto não estéril

### Indicação de uso / Finalidade:

Aspirador de Gases Bhio Supply é indicado para a aspiração de gases gerados durante o uso do Portal BHIOQAP Descartável Bhio Supply (cadastro ANVISA número 80381210072). Ele deve ser utilizado em conjunto com o Circuito de Aspiração com Filtro para BHIOQAP Bhio Supply (cadastro ANVISA número 80381210073).

### Princípio de funcionamento:

O Aspirador de Gases Bhio Supply funciona com um motor à diafragma que gera pressão negativa de 85kPA. Possui um knob para controle do fluxo de aspiração, sendo o fluxo máximo 40L/min.



### Especificações / Composição:

- Frequência da rede de alimentação: 50/60 Hz.
- Tensão (Volts): 127 ou 220 VAC, conforme chave seletora de tensão.
- Potência motor: 1/5 HP.
- Tipo de corrente: AC (alternada).
- Número de fases: Bifásico.
- Compressor: Diafragma.
- Capacidade máxima de aspiração: 650mmhg / 85kpa

- Fluxo de aspiração: 40 L/min.
- Controle fluxo de aspiração: Através de botão de controle.
- Controles: Liga/desliga, controle de fluxo.
- Gabinete: Poliuretano rígido.
- Peso: 5.95 kg
- Dimensões do equipamento: 200 mm(L)x250mm(A)x380mm(P).
- Embalagem: Caixa de papelão.
- Cabo de força: 2 polos com 3º pino para aterramento, 3 x 0,75mm<sup>2</sup>

## **Modelos:**

OWAOA00.

## **Modo de Uso:**

O equipamento deve ser utilizado somente com o Circuito de Aspiração com Filtro para BHIOQAP Bhio Supply (vendido separadamente) para aspiração de gases durante o uso do Portal BHIOQAP Descartável Bhio Supply (vendido separadamente).

O produto deve ser utilizado somente por profissionais que receberam treinamento para utilização do conjunto BHIOQAP.

## **Limpeza e Desinfecção:**

O equipamento deve ser limpo antes e após a utilização.

### Limpeza:

1. Desconectar o equipamento da rede elétrica;
2. Limpar o equipamento com pano umedecido em solução de detergente neutro;
3. Enxaguar apenas com pano umedecido em água;
4. Secar o equipamento com pano macio;

**ATENÇÃO: Não submergir o equipamento em água. Não lavar o equipamento com água corrente, utilize apenas pano úmido.**

### Desinfecção:

1. Após o equipamento estar seco, realizar a desinfecção com fricção por pelo menos 30 segundos com pano umedecido em álcool etílico 70%. Outro desinfetante de sua preferência desde que compatível com os componentes do equipamento;
2. Deixar secar ao natural.

## **Armazenamento / Transporte:**

Armazenar conforme normas para produtos correlatos, em local bem ventilado, limpo e fresco, sem presença de gases corrosivos, à temperatura e umidade ambiente. Não molhar ou danificar as embalagens originais.

Não são necessários cuidados especiais no transporte, os produtos podem ser transportados a temperatura e umidade ambiente.

## **Contraindicações / Efeitos Adversos:**

Não há contraindicações nem efeitos adversos para o uso do produto.

## **Advertências e Precauções:**

- O equipamento deve ser utilizado somente com o Circuito de Aspiração com Filtro para BHIOQAP Bhio Supply para aspiração de gases durante o uso do Portal BHIOQAP Descartável Bhio Supply;
- Observe se a tensão selecionada na parte traseira do aspirador está de acordo com a rede elétrica;
- Nunca utilize plugues adaptadores, benjamins, tee e similares. O aspirador deve ter uma tomada de energia elétrica exclusiva;
- Jamais corte o pino central do cabo de força. Ele é responsável pela segurança do operador uma vez que o aterramento do aspirador é conectado ao aterramento da rede de energia elétrica através deste pino;
- Jamais tente conectar o cabo de força do aspirador na tomada da rede elétrica com as mãos úmidas ou molhadas, podendo receber choques elétricos;
- Não derrame líquidos no produto;
- Não utilizar material abrasivo, palha de aço, solventes orgânicos, tiner ou corrosivos durante a limpeza.

## **Garantia:**

Os produtos fabricados pela Bhio Supply Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos S/A. são garantidos contra defeitos de fabricação. Esta garantia tem prazo de 1 (um) ano a partir da data de emissão da nota fiscal.

Serão reparados ou substituídos os produtos que comprovadamente tenham apresentado defeito durante o prazo de validade da garantia. Para isso, os produtos deverão ser remetidos ao departamento de Assistência Técnica da Bhio Supply, acompanhados da descrição do defeito apresentado.

Esta garantia será invalidada se for verificado que o produto foi sujeito a manuseio inadequado, quedas, negligências, imprudências, Imperícia, condições ambientais diferentes das especificadas para o produto, conexões incorretas, substituições de componentes ou partes do produto por peças não originais ou, alterações e reparos realizados por assistência técnica não autorizada pela Bhio Supply.

## **Assistência Técnica:**

A Bhio Supply presta assistência técnica para todos os seus produtos. Os canais de contato para assuntos relacionados à Assistência Técnica são os seguintes:

e-mail: [assistencia@bhiosupply.com.br](mailto:assistencia@bhiosupply.com.br)

Fone: +55 51 3459 4000

Endereço:

Av. Luiz Pasteur, N° 4959 – Esteio – RS – Brasil  
CEP: 93.290.010

## **Fabricante Legal:**

Bhio Supply Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos S/A.

CNPJ: 73.297.509/0001-11

Endereço:

Av. Luiz Pasteur, N°4959 – Esteio/RS - Brasil  
Telefone/Fax: 55 51 3473-7450 / 3458-4479  
Telefone SAC: 55 51 3459-4000



[www.bhiosupply.com.br](http://www.bhiosupply.com.br)

**Responsável Técnico:**

**Jaqueline Timm – CRF/RS 10514**

**Unidade Fabril:**

Bhio Supply Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos S/A.

CNPJ: 73.297.509/0001-11

Endereço:

Av. Luiz Pasteur, N°4959 – Esteio/RS - Brasil

Telefone/Fax: 55 51 3473-7450 / 3458-4479

Telefone SAC: 55 51 3459-4000

[www.bhiosupply.com.br](http://www.bhiosupply.com.br)

**Responsável Técnico:**

**Jaqueline Timm – CRF/RS 10514**