

Suporte para Capa Flexível Bhio Supply

Registro ANVISA Nº: 80381210114

Nome Técnico: Protetores



Antes do uso, leia atentamente as instruções presentes neste manual.



Produto não estéril

Indicação de uso / Finalidade:

O Suporte para Capa Flexível Bhio Supply é indicado para uso em conjunto com o Sistema de Contenção para Síndromes Respiratórias Bhio Supply (processo de notificação peticionado à ANVISA em petição separada). Possui a função de sustentar a capa de proteção flexível sobre o paciente criando um espaço de contenção para pacientes com infecções respiratórias altamente transmissíveis como, por exemplo, COVID-19, MERS, SARS, H1N1 entre outras.

Princípio de funcionamento:

Trata-se de uma estrutura metálica em formato de arcos que é presa sob o colchão do leito hospitalar. Sua função é sustentar a capa plástica flexível à uma altura aproximada de 70cm, criando assim um espaço entre o paciente e a capa plástica. Pelas características flexíveis das hastes curvas, o suporte pode ser usado em leitos de diferentes larguras. O Suporte para Capa Flexível Bhio Supply deve ser utilizado em conjunto com o Sistema de Contenção para Síndromes Respiratórias Bhio Supply. O suporte é metálico, reutilizável e autoclave, enquanto os demais componentes do sistema de contenção são de uso único.

Especificações / Composição:


O produto é fabricado em Aço Inox AISI 303 e Aço Inox AISI 304.

Modelos:

ONC0000.

Advertências e Precauções:

- Realizar a inspeção do produto antes do uso e após cada utilização, a isenção de danos superficiais;
- Produto não estéril, realizar limpeza e esterilização antes do uso;
- Não utilizar produtos químicos corrosivos para a limpeza;
- Durante a limpeza, utilize detergentes enzimáticos, não utilize soluções de limpeza abrasivas;
- Utilize água em conformidade com a NBR ISO 17665:2010.

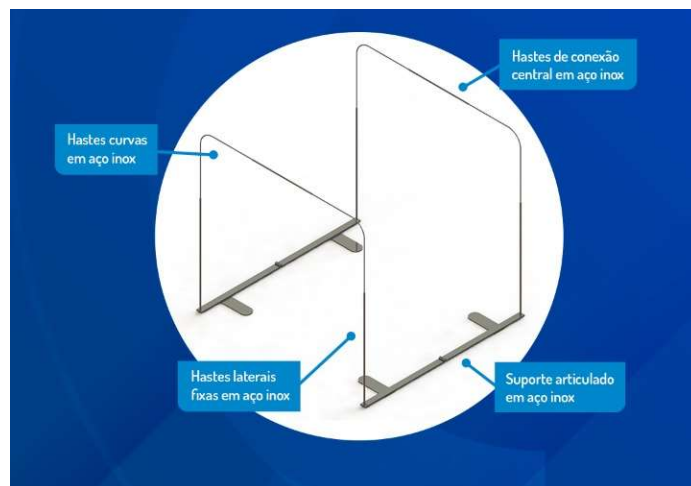

Contraindicações / Efeitos Adversos:

Não há contraindicações nem efeitos adversos para o uso do produto.

Modo de Uso:

As decisões de procedimentos médicos e metodologias para contenção de pacientes com infecções respiratórias são de responsabilidade do médico.

O modo de uso proposto nessa instrução de uso baseia-se na metodologia utilizada para avaliação da efetividade do sistema. Variações no modo de uso não foram avaliadas.

O uso do Suporte para Capa Flexível juntamente com o Sistema de Contenção para Síndromes Respiratórias Bhio Supply não substitui o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e não dispensa os protocolos padronizados para tratamento de pacientes com doenças respiratórias contagiosas.

Passo a passo para uso:

1. Com o paciente já deitado no leito de destino, colocar a base de apoio do suporte embaixo do colchão. Posicionar o suporte para que esteja na parte móvel do leito hospitalar, desta forma a utilização do suporte não influencia nos movimentos e dinâmica do leito;
 2. Colocar as hastes laterais do suporte mosqueando-as na base de apoio;
 3. Encaixar as hastes curvas nas hastes laterais;
 4. Colocar as hastes de conexão central, fazendo a conexão entre as hastes laterais;
- Nesse momento o suporte está montado e pronto para uso;
5. Colocar a capa flexível e o sistema de aspiração conforme instruções de uso do Sistema de Contenção para Síndromes Respiratórias Bhio Supply (produto vendido separadamente);
 6. Após cada troca da capa flexível do sistema de contenção fazer a desinfecção do suporte com álcool 70%. Para desinfecção não é necessário retirar o suporte do leito;
 7. Após a utilização encaminhar o suporte para a Central de Materiais e Esterilização (CME) para que seja realizada a limpeza e esterilização do produto conforme descrito abaixo;
 8. Sempre realizar limpeza e esterilização conforme descrito abaixo quando for iniciar o uso do suporte em um novo paciente.

ATENÇÃO: Todo instrumento cirúrgico fornecido não estéril, deve ser limpo e esterilizado antes de ser usado pela primeira vez e após cada utilização.

Processamento:

Etapa 1: Utilizar água corrente para a pré-lavagem;

Etapa 2: Desmontar todas as partes desmontáveis e lavar com escova de cerdas macias e água corrente;

Etapa 3: Após ser lavado, imergir as partes em solução com detergente neutro ou detergente enzimático. Importante verificar diluição, tempo de imersão e temperatura no rótulo do produto. Se a imersão for feita em uma cuba ultrassônica, essa deve ser feita por pelo menos 10 minutos, se for em cuba comum (sem ultrassom) usar escova de cerdas macias e/ou esponjas para auxiliar na remoção das sujidades;

Etapa 4: Enxaguar abundantemente, sendo que se recomenda o uso de água de osmose reversa ou destilada para a lavagem do produto;

Etapa 5: Secar totalmente o instrumental com auxílio de jato de ar comprimido seguido de estufa ou pano que não desprenda partículas. Evitar que seque ao “natural”, a secagem por evaporação “natural” causa manchas;

Etapa 6: Realizar a inspeção final do produto visando garantir que resíduos cirúrgicos tenham sido completamente removidos, que materiais corroídos (instrumentos), sejam retirados de utilização, que instrumentos danificados sejam enviados a manutenção e produtos ainda úmidos sejam secos;

Etapa 7: Embalar o produto em embalagens para esterilização que podem ser bandejas/containers mais SMS ou papel grau cirúrgico;

Etapa 8: Após embalados, proceder com a esterilização por vapor úmido;

Esterilização:

O método de esterilização indicado para o produto e seus acessórios é a esterilização por vapor úmido sob pressão. Sugere-se o ciclo padrão 134° C por 3,5 a 5 minutos ou 121°C por 15 minutos. Outros tempos e temperaturas podem ser utilizados, entretanto, o usuário deverá validar qualquer desvio dos parâmetros.

Etapa 9: Após embalados, colocar dentro das autoclaves para iniciar o processo de esterilização;

Etapa 10: Os instrumentos devem ser armazenados em lugares arejados, protegidos de umidade, calor e poeira. O processo de esterilização só se mantém com o correto armazenamento do material depois de esterilizado.

ATENÇÃO: A temperatura da autoclave não deverá exceder a 137° C (280°F).

Recomendamos a lubrificação quando necessária, somente com lubrificantes a base de óleo mineral.

Certifique-se de que a autoclave esteja com a qualificação e validação em dia, pois variações podem implicar na contaminação da câmara ou condensação do vapor ocasionando manchas.



A esterilização não substitui o processo de limpeza do instrumento.

Cuidados:

- Após ser utilizado, o instrumento cirúrgico deve ser encaminhado a Central de Material e Esterilização (CME), onde os instrumentais serão processados com maior brevidade possível;
- Não utilizar produtos químicos corrosivos para limpeza;
- Não utilizar produtos abrasivos como palha de aço;
- Caso o produto apresentar qualquer dificuldade no manuseio, separe-o e encaminhe para nossa assistência técnica.

Armazenamento / Transporte:

Armazenar conforme normas para produtos correlatos, em local bem ventilado, limpo e fresco, sem presença de gases corrosivos, à temperatura e umidade ambiente. Não molhar ou danificar as embalagens originais.

Não são necessários cuidados especiais no transporte, os produtos podem ser transportados à temperatura e umidade ambiente.

Garantia:

Os produtos fabricados pela Bhio Supply Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos S/A. são garantidos contra defeitos de fabricação. Esta garantia tem prazo de 1 (um) ano a partir da data de emissão da nota fiscal.

Serão reparados ou substituídos os produtos que comprovadamente tenham apresentado defeito durante o prazo de validade da garantia. Para isso, os produtos deverão ser remetidos ao departamento de Assistência Técnica da Bhio Supply, acompanhados da descrição do defeito apresentado.

Esta garantia será invalidada se for verificado que o produto foi sujeito a manuseio inadequado, quedas, negligências, imprudências, Imperícia, condições ambientais diferentes das especificadas para o produto, conexões incorretas, substituições de componentes ou partes do produto por peças não originais ou, alterações e reparos realizados por assistência técnica não autorizada pela Bhio Supply.

Assistência Técnica:

A Bhio Supply presta assistência técnica para todos os seus produtos. Os canais de contato para assuntos relacionados a Assistência Técnica são os seguintes:

e-mail: assistencia@bhiosupply.com.br

Fone: +55 51 3459 4000

Endereço:

Av. Luiz Pasteur, N° 4959 – Esteio – RS – Brasil

CEP: 93.290.010

Fabricante Legal:

Bhio Supply Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos S/A.

CNPJ: 73.297.509/0001-11

Endereço:

Av. Luiz Pasteur, N°4959 – Esteio/RS - Brasil

Telefone/Fax: 55 51 3473-7450 / 3458-4479

Telefone SAC: 55 51 3459-4000

www.bhiosupply.com.br

Responsável Técnico:

Jaqueline Timm – CRF/RS 10514

Unidade Fabril:

Bhio Supply Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos S/A.

CNPJ: 73.297.509/0001-11

Endereço:

Av. Luiz Pasteur, N°4959 – Esteio/RS - Brasil

Telefone/Fax: 55 51 3473-7450 / 3458-4479

Telefone SAC: 55 51 3459-4000

www.bhiosupply.com.br

Responsável Técnico:

Jaqueline Timm – CRF/RS 10514