

Máscara Orofaríngea Besmed

Registro ANVISA Nº: 80381219002

Nome Técnico: Máscaras



Antes do uso, leia atentamente as instruções presentes neste manual.

STERILE EO

Produto estéril

Indicação de uso / Finalidade:

A Máscara Orofaríngea Besmed é indicada para permitir a ventilação pulmonar através das vias aéreas superiores. Trata-se de um dispositivo supra glótico. Dispensa a laringoscopia por permitir rapidamente o acesso e controle das vias aéreas superiores.

Princípio de funcionamento:

A Máscara Orofaríngea Besmed é um tubo semi curvo, que se inicia em um conector padrão de 15mm e termina em uma pequena máscara com um suporte periférico inflável, que forma uma vedação em volta da entrada da laringe. Acomoda-se na hipofaringe, sobrepondo a laringe com uma câmara inflável, ocluindo o esôfago.

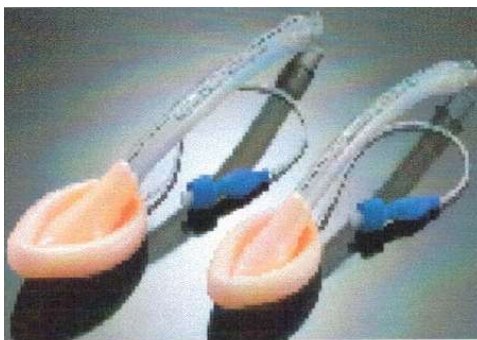


Figura: Máscaras Orofaríngeas Besmed

Especificações / Composição:

As máscaras são fabricadas em silicone e polisulfona.

Modelos:

LA-6440; LA-6410; LA-6415; LA-6420; LA-6425; LA-6430; LA-6450.

Modo de Uso:

Imediatamente antes do uso, desinfele totalmente o manguito da máscara orofaríngea, contra uma superfície plana, procurando manter suas bordas lisas e com formato uniforme.

ATENÇÃO: Cuidado para não formar dobras.

- 1) Lubrifique a face posterior da máscara orofaríngea com gel hidrossolúvel ou anestésico;
- 2) Posicione a cabeça e o pescoço do paciente como para uma intubação endotraqueal;

- 3) Segure a máscara como se fosse uma caneta, com o dedo indicador na junção do manguito e do tubo;
- 4) Mantenha o pescoço flexionado e a cabeça estendida com uma mão, enquanto com a outra inicie a passagem da máscara orofaríngea, com sua abertura dirigida para FRENTE e o dorso contra os dentes incisivos do paciente;
- 5) Com a máscara corretamente alinhadas, deve-se observar uma linha preta ao longo do tubo, indicando o lado posterior convexo da máscara orofaríngea. Essa linha serve de ponto de referência e aponta sempre em direção ao nariz do paciente;
- 6) Ainda segurando como se fosse uma caneta, pressione sua ponta contra o palato duro, assegurando que a parte posterior esteja plana sobre o palato e sua ponta não esteja dobrada, antes de continuar a introdução na máscara;
- 7) Com o dedo indicador ainda mantendo pressão contra o platô, empurre a máscara para baixo, de preferência em um único e rápido movimento;
- 8) **ATENÇÃO: Evite o contato da ponta da máscara com a epiglote para não a traumatizar;**
- 9) Sem deslocar a máscara da posição, use a mão livre para segurar o tubo, enquanto, simultaneamente, retire o dedo indicador da cavidade oral do paciente;
- 10) Ao mesmo tempo, introduza mais a máscara até encontrar uma resistência elástica (pressão no esfíncter esofágico superior);
- 11) Solte a máscara, deixando-a totalmente livre. A máscara está devidamente posicionada.

Esterilização:

O método de esterilização utilizado é óxido de etileno.

Validade:

3 anos da data de esterilização.

Armazenamento / Transporte:

Armazenar conforme normas para produtos correlatos, em local bem ventilado, limpo e fresco, sem presença de gases corrosivos, à temperatura e umidade ambiente. Não molhar ou danificar as embalagens originais.

Não são necessários cuidados especiais no transporte, os produtos podem ser transportados a temperatura e umidade ambiente.

Advertências e Precauções:

- O produto deve ser manipulado assepticamente, seguindo os procedimentos para manipulação de produto estéril;
- Não utilizar se a embalagem estiver violada. Inspecionar a embalagem antes do uso;
- Abrir assepticamente a embalagem, após se certificar das características técnicas do produto;
- Não utilizar se for notado qualquer dano na estrutura da máscara.

Contraindicações / Efeitos Adversos:

Não há contraindicações nem efeitos adversos para o uso do produto.

Garantia:

Os produtos fabricados e importados pela Bhio Supply Industria e Comércio de Equipamentos Médicos S/A. são garantidos contra defeitos de fabricação.

Os produtos que comprovadamente tenham apresentado defeito durante o período de validade serão substituídos pela Bhio Supply. Para isso, os produtos deverão ser remetidos ao departamento de assistência técnica da Bhio Supply, acompanhados da descrição do defeito apresentado.

Esta garantia será invalidada caso seja verificado que o produto foi sujeito a manuseio inadequado.

Assistência Técnica:

A Bhio Supply presta assistência técnica para todos os seus produtos. Os canais de contato para assuntos relacionados a Assistência Técnica são os seguintes:

e-mail: assistencia@bhiosupply.com.br

Fone: +55 51 3459 4000

Endereço:

Av. Luiz Pasteur, N° 4959 – Esteio – RS – Brasil

CEP: 93.290.010

Fabricado por:

Besmed Health Business Corp.

5F, N° 12, Wu-Chun 7th Rd., Wu-Ku Hsiang, Taipei Hsien, Taiwan, República Popular da China.

Importado por:

Bhio Supply Industria e Comércio de Equipamentos Médicos S/A.

CNPJ: 73.297.509/0001-11

Endereço:

Av. Luiz Pasteur, N°4959 – Esteio/RS - Brasil

Telefone/Fax: 55 51 3473-7450 / 3458-4479

Telefone SAC: 55 51 3459-4000

www.bhiosupply.com.br

Responsável Técnico:

Jaqueline Timm – CRF/RS 10514