

## Cânulas de Silicone com Trocater Bhio Supply

Registro ANVISA Nº: 80381219005

Nome Técnico: Cânulas



Antes do uso, leia atentamente as instruções presentes neste manual.

**STERILE | EO**

Produto estéril



Nº de Lote, data de fabricação e validade: Verificar rotulagem do produto



Reprocessamento proibido

### Indicação de uso / Finalidade:


As Cânulas de Silicone com Trocater Bhio Supply são indicadas para a drenagem de fluidos corporais (como pus e sangue) após procedimentos cirúrgicos e endoscópicos facilitando a cicatrização e diminuindo o risco de infecções. As cânulas são fabricadas em silicone grau médico transparente, com faixa radiopaca em toda a sua extensão para visualização em exames de raio-x.

### Princípio de funcionamento:

As Cânulas de Silicone com Trocater Bhio Supply possuem canais de drenagem, quando inseridas em feridas cirúrgicas fazem a drenagem de fluidos como sangue, pus e secreções, auxiliando a diminuir o edema pós cirúrgico e acelerando o processo de cicatrização. A flexibilidade do silicone produz mais conforto durante a movimentação do paciente e menor desconforto na remoção da cânula, quando comparada com os modelos rígidos de PVC. Todos os modelos possuem faixa radiopaca para identificação e visualização em exames de raio-x. Os modelos possuem trocater para a realização de acesso para colocação da cânula.

### Especificações / Composição:

As Cânulas de Silicone com Trocater Bhio Supply são fabricadas em silicone grau médico e o trocater em aço inox AISI 303 e Aço Inox AISI 304.

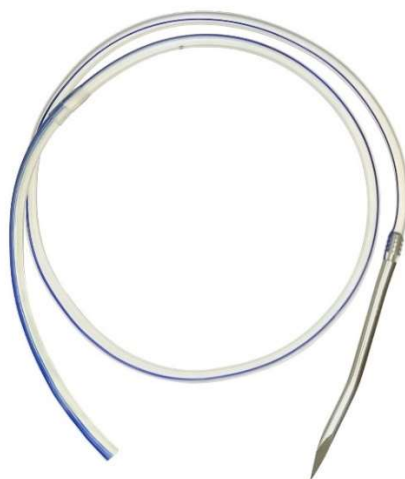

**Figura: Cânulas de Silicone com Trocater Bhio Supply**

## **Modelos:**

OMDDRJAC; OMDDRLAC; OMDDRMAC; OMDDRNAC; OMDDROAC; OMDDRPAC; OMDDRQAC; OMDDRRAC; OMDDRSAC; OMDDRTAC; OMDD1LAC; OMDD1MAC; OMDD1NAC; OMDD1OAC; OMDD1PAC; OMDD1QAC; OMDD1RAC; OMDD1SAC; OMDD1TAC; OMDD1UAC; OMDD2YAC; OMDD2ZAC; OMDD15AC; OMDDPVAC; OMDDPXAC.

## **Modo de Uso:**

O procedimento cirúrgico é a critério do médico cirurgião, a escolha do tipo de cânula e a metodologia de utilização, variam de acordo com a técnica empregada. Esse produto deve ser utilizado somente por profissionais habilitados e treinados para as técnicas utilizadas.

Orientações gerais para procedimento com uso desse produto:

1. Escolher um modelo de cânula, de acordo com a necessidade do paciente. A largura, comprimento e formato da cânula devem ser proporcionais ao local a ser drenado;
2. A cânula deve ser inserida no final do procedimento cirúrgico;
3. Abrir a embalagem em ambiente estéril. Observar integridade da embalagem antes da utilização. Não utilizar produto com a embalagem corrompida;
4. Se necessário, utilizar o trocater para fazer nova incisão. Após uso, retirar o trocater da parte distal da cânula;
5. Introduzir a cânula posicionando a mesma à menor distância do local a ser drenado. A cânula deve ser posicionada de maneira a evitar dobras, torções ou compressões ao longo do seu trajeto;
6. Realizar a mobilização da cânula, que impede o seu escape para dentro ou para fora do organismo, de acordo com critério médico;
7. O orifício de saída da cânula deve ser conectado a um reservatório ou bolsa plástica estéril. Para drenagem de volumes muito pequenos a saída da cânula pode ser fechada com gaze;
8. A quantidade de cânulas a ser colocada, modelo a ser utilizado, tipos de reservatórios e sistemas de sucção são de escolha do médico e variam conforme técnica cirúrgica aplicada e condição do paciente;
9. Sugere-se a utilização da Cânulas de Silicone com Trocater Bhio Supply com os Reservatórios de Silicone Bhio Supply (produto vendido separadamente, Cadastro ANVISA Nº: 80381219003).
9. A retirada da cânula é a critério do médico. No entanto, esse é um produto de uso de curto prazo, por isso não deve permanecer no paciente por mais de 30 dias.

Após a utilização descartar o produto conforme Plano de Gerenciamento de Resíduos do estabelecimento de saúde para resíduo potencialmente contaminado.



**Reprocessamento proibido!**

## **Esterilização:**

O método de esterilização utilizado é óxido de etileno.

## **Validade:**

3 anos.

## **Armazenamento / Transporte:**

Armazenar conforme normas para produtos correlatos, em local bem ventilado, limpo e fresco, sem presença de gases corrosivos, à temperatura e umidade ambiente. Não molhar ou danificar as embalagens originais.

Não são necessários cuidados especiais no transporte, os produtos podem ser transportados a temperatura e umidade ambiente.

**ATENÇÃO: Evitar exposição prolongada a temperatura elevada.**

**Não exponha a temperatura acima de 54°C (130°F).**

## **Advertências e Precauções:**

- Proibido reprocessamento. Produto de uso único;
- Inspeccionar a integridade da embalagem antes de usar. Não usar o produto se a embalagem estiver avariada;
- Verificar a data de validade antes do uso. Não utilizar o produto se estiver com o prazo de validade vencido;
- O produto deve ser manipulado somente por profissionais da saúde capacitados;
- Sempre inspeccionar o produto antes da utilização;
- O produto deve ser manipulado assepticamente, seguindo os procedimentos para manipulação de produto estéril;
- Após o uso, deve ser descartado conforme protocolo do serviço de saúde para destinação de resíduos potencialmente contaminados;
- Evitar contato com petróleo e seus derivados.

## **Contraindicações / Efeitos Adversos:**

Não há contraindicações nem efeitos adversos para o uso do produto.

## **Garantia:**

Os produtos fabricados pela Bhio Supply Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos S/A. são garantidos contra defeitos de fabricação.

Os produtos que comprovadamente tenham apresentado defeito serão substituídos pela Bhio Supply. Para isso, os produtos deverão ser remetidos ao departamento de assistência técnica da Bhio Supply, acompanhados da descrição do defeito apresentado. Caso o produto estiver contaminado, o mesmo deve ser limpo e desinfectado antes do envio.

A garantia será invalidada caso seja verificado que o produto foi sujeito a manuseio inadequado.

## **Assistência Técnica:**

A Bhio Supply presta assistência técnica para todos os seus produtos. Os canais de contato para assuntos relacionados a Assistência Técnica são os seguintes:

e-mail: [assistencia@bhiosupply.com.br](mailto:assistencia@bhiosupply.com.br)

Fone: +55 51 3459 4000

Endereço:

Av. Luiz Pasteur, N° 4959 – Esteio – RS – Brasil

CEP: 93.290.010

**Fabricante Legal:**

Bhio Supply Industria e Comércio de Equipamentos Médicos S/A.

CNPJ: 73.297.509/0001-11

Endereço:

Av. Luiz Pasteur, N°4959 – Esteio/RS - Brasil

Telefone/Fax: 55 51 3473-7450 / 3458-4479

Telefone SAC: 55 51 3459-4000

[www.bhiosupply.com.br](http://www.bhiosupply.com.br)

**Responsável Técnico:**

**Jaqueline Timm – CRF/RS 10514**

**Unidade Fabril:**

Bhio Supply Industria e Comércio de Equipamentos Médicos S/A.

CNPJ: 73.297.509/0001-11

Endereço:

Av. Luiz Pasteur, N°4959 – Esteio/RS - Brasil

Telefone/Fax: 55 51 3473-7450 / 3458-4479

Telefone SAC: 55 51 3459-4000

[www.bhiosupply.com.br](http://www.bhiosupply.com.br)

**Responsável Técnico:**

**Jaqueline Timm – CRF/RS 10514**