

Cestos Endoscópicos em Nitinol para Remoção de Cálculos Bhio Supply

Registro ANVISA Nº: 8038129010

Nome Técnico: Cesto endoscópico para remoção de cálculos



Antes do uso, deve-se ler atentamente as instruções presentes neste manual.



Produto estéril.



Nº de Lote, data de fabricação e validade: Verificar rotulagem do produto.



Fabricante recomenda uso único.

Indicação de uso / Finalidade:

Os Cestos Endoscópicos em Nitinol para Remoção de Cálculos Bhio Supply são indicados para capturar, manipular, libertar e remover cálculos renais e outros corpos estranhos do trato urinário durante procedimentos endoscópicos. Por essa razão são classificados com dispositivos médicos invasivos aplicáveis através de orifícios corporais, durante procedimentos cirúrgicos, de uso transitório.

Princípio de funcionamento:

A remoção dos cálculos renais é feita pela inserção do instrumental através do canal de trabalho de uma camisa ou endoscópio dentro do ureter ou da pélvis renal. A parte ativa das pinças é constituída por um cesto que se abre e se fecha permitindo ao cirurgião a captura, manipulação, liberação e finalmente a remoção de cálculos e corpos estranhos do trato urinário. O princípio de funcionamento é puramente mecânico através da tração do cesto realizado pela empunhadura do instrumental e controlada manualmente pelo cirurgião. Os diferentes modelos de cestos (parte ativa) visam proporcionar ao cirurgião a escolha adequada conforme tamanho e formato do cálculo a ser removido. Os modelos também apresentam diferentes comprimentos e diâmetros para melhor adaptação a diferentes pacientes e estruturas anatômicas.



Figura 1: Cestos Endoscópicos em Nitinol para remoção de cálculos Bhio Supply.

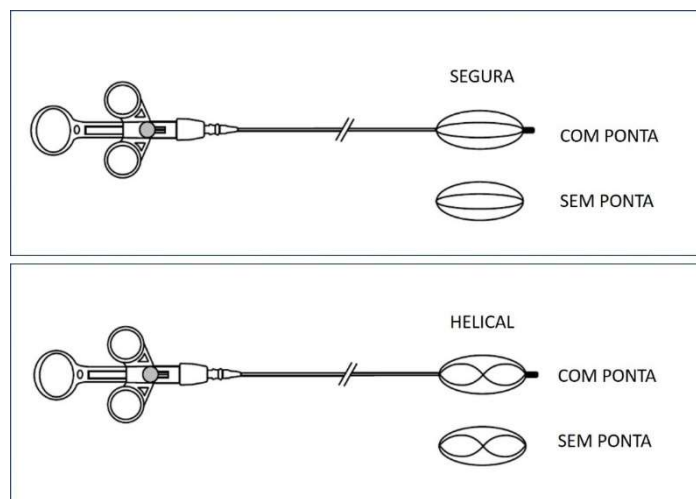


Figura 2: Modelos dos Cestos Endoscópicos em Nitinol para remoção de cálculos Bhio Supply.

O modelo SEGURA apresenta design ideal para os cálculos que se encontram em posições difíceis, com muita eficiência e baixo risco de trauma. A articulação permite uma maior aproximação dos cálculos.

O modelo HELICAL ajuda na captura de cálculos e pequenos fragmentos conforme é girado durante o processo de captura. Os fios da cesta varrem os cálculos para fora das paredes do ureter.

Especificações / Composição:

Os cestos são fabricados em nitinol, ABS, PVC e polipropileno.

Embalagem:

O produto será fornecido em embalagem individual (1 unidade), esterilizado por óxido de etileno, acondicionado em blister em PET, selado com Tyvek®.

Modelos:

- OMSN32C3 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL COM PONTA 3 FIOS 2,5FR 110CM NITINOL;
- OMSN32C4 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL COM PONTA 4 FIOS 2,5FR 110CM NITINOL;
- OMSN32C5 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL COM PONTA 5 FIOS 2,5FR 110CM NITINOL;
- OMSN32A3 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL COM PONTA 3 FIOS 2,5FR 70CM NITINOL;
- OMSN32A4 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL COM PONTA 4 FIOS 2,5FR 70CM NITINOL;
- OMSN32A5 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL COM PONTA 5 FIOS 2,5FR 70CM NITINOL;
- OMSN32B3 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL COM PONTA 3 FIOS 2,5FR 90CM NITINOL;
- OMSN32B4 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL COM PONTA 4 FIOS 2,5FR 90CM NITINOL;
- OMSN32B5 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL COM PONTA 5 FIOS 2,5FR 90CM NITINOL;
- OMSN33C3 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL COM PONTA 3 FIOS 3FR 110CM NITINOL;
- OMSN33C4 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL COM PONTA 4 FIOS 3FR 110CM NITINOL;
- OMSN33C5 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL COM PONTA 5 FIOS 3FR 110CM NITINOL;
- OMSN33A3 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL COM PONTA 3 FIOS 3FR 70CM NITINOL;
- OMSN33A4 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL COM PONTA 4 FIOS 3FR 70CM NITINOL;
- OMSN33A5 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL COM PONTA 5 FIOS 3FR 70CM NITINOL;
- OMSN33B3 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL COM PONTA 3 FIOS 3FR 90CM NITINOL;
- OMSN33B4 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL COM PONTA 4 FIOS 3FR 90CM NITINOL;
- OMSN33B5 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL COM PONTA 5 FIOS 3FR 90CM NITINOL;
- OMSN34C3 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL COM PONTA 3 FIOS 4FR 110CM NITINOL;
- OMSN34C4 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL COM PONTA 4 FIOS 4FR 110CM NITINOL;
- OMSN34C5 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL COM PONTA 5 FIOS 4FR 110CM NITINOL;

OMSN34A3 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL COM PONTA 3 FIOS 4FR 70CM NITINOL;
OMSN34A4 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL COM PONTA 4 FIOS 4FR 70CM NITINOL;
OMSN34A5 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL COM PONTA 5 FIOS 4FR 70CM NITINOL;
OMSN34B3 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL COM PONTA 3 FIOS 4FR 90CM NITINOL;
OMSN34B4 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL COM PONTA 4 FIOS 4FR 90CM NITINOL;
OMSN34B5 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL COM PONTA 5 FIOS 4FR 90CM NITINOL;
OMSN35C3 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL COM PONTA 3 FIOS 5FR 110CM NITINOL;
OMSN35C4 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL COM PONTA 4 FIOS 5FR 110CM NITINOL;
OMSN35C5 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL COM PONTA 5 FIOS 5FR 110CM NITINOL;
OMSN35A3 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL COM PONTA 3 FIOS 5FR 70CM NITINOL;
OMSN35A4 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL COM PONTA 4 FIOS 5FR 70CM NITINOL;
OMSN35A5 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL COM PONTA 5 FIOS 5FR 70CM NITINOL;
OMSN35B3 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL COM PONTA 3 FIOS 5FR 90CM NITINOL;
OMSN35B4 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL COM PONTA 4 FIOS 5FR 90CM NITINOL;
OMSN35B5 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL COM PONTA 5 FIOS 5FR 90CM NITINOL;
OMSN12C3 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA COM PONTA 3 FIOS 2,5FR 110CM NITINOL;
OMSN12C4 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA COM PONTA 4 FIOS 2,5FR 110CM NITINOL;
OMSN12C5 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA COM PONTA 5 FIOS 2,5FR 110CM NITINOL;
OMSN12A3 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA COM PONTA 3 FIOS 2,5FR 70CM NITINOL;
OMSN12A4 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA COM PONTA 4 FIOS 2,5FR 70CM NITINOL;
OMSN12A5 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA COM PONTA 5 FIOS 2,5FR 70CM NITINOL;
OMSN12B3 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA COM PONTA 3 FIOS 2,5FR 90CM NITINOL;
OMSN12B4 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA COM PONTA 4 FIOS 2,5FR 90CM NITINOL;
OMSN12B5 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA COM PONTA 5 FIOS 2,5FR 90CM NITINOL;
OMSN13C3 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA COM PONTA 3 FIOS 3FR 110CM NITINOL;
OMSN13C4 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA COM PONTA 4 FIOS 3FR 110CM NITINOL;
OMSN13C5 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA COM PONTA 5 FIOS 3FR 110CM NITINOL;
OMSN13A3 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA COM PONTA 3 FIOS 3FR 70CM NITINOL;
OMSN13A4 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA COM PONTA 4 FIOS 3FR 70CM NITINOL;
OMSN13A5 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA COM PONTA 5 FIOS 3FR 70CM NITINOL;
OMSN13B3 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA COM PONTA 3 FIOS 3FR 90CM NITINOL;
OMSN13B4 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA COM PONTA 4 FIOS 3FR 90CM NITINOL;
OMSN13B5 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA COM PONTA 5 FIOS 3FR 90CM NITINOL;
OMSN14C3 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA COM PONTA 3 FIOS 4FR 110CM NITINOL;
OMSN14C4 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA COM PONTA 4 FIOS 4FR 110CM NITINOL;
OMSN14C5 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA COM PONTA 5 FIOS 4FR 110CM NITINOL;
OMSN14A3 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA COM PONTA 3 FIOS 4FR 70CM NITINOL;
OMSN14A4 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA COM PONTA 4 FIOS 4FR 70CM NITINOL;
OMSN14A5 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA COM PONTA 5 FIOS 4FR 70CM NITINOL;
OMSN14B3 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA COM PONTA 3 FIOS 4FR 90CM NITINOL;
OMSN14B4 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA COM PONTA 4 FIOS 4FR 90CM NITINOL;
OMSN14B5 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA COM PONTA 5 FIOS 4FR 90CM NITINOL;
OMSN15C3 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA COM PONTA 3 FIOS 5FR 110CM NITINOL;
OMSN15C4 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA COM PONTA 4 FIOS 5FR 110CM NITINOL;
OMSN15C5 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA COM PONTA 5 FIOS 5FR 110CM NITINOL;
OMSN15A3 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA COM PONTA 3 FIOS 5FR 70CM NITINOL;
OMSN15A4 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA COM PONTA 4 FIOS 5FR 70CM NITINOL;
OMSN15A5 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA COM PONTA 5 FIOS 5FR 70CM NITINOL;
OMSN15B3 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA COM PONTA 3 FIOS 5FR 90CM NITINOL;
OMSN15B4 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA COM PONTA 4 FIOS 5FR 90CM NITINOL;
OMSN15B5 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA COM PONTA 5 FIOS 5FR 90CM NITINOL;
OMSN42C3 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL SEM PONTA 3 FIOS 2,5FR 110CM NITINOL;
OMSN42C4 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL SEM PONTA 4 FIOS 2,5FR 110CM NITINOL;
OMSN42C5 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL SEM PONTA 5 FIOS 2,5FR 110CM NITINOL;
OMSN42A3 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL SEM PONTA 3 FIOS 2,5FR 70CM NITINOL;
OMSN42A4 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL SEM PONTA 4 FIOS 2,5FR 70CM NITINOL;
OMSN42A5 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL SEM PONTA 5 FIOS 2,5FR 70CM NITINOL;

QMSN42B3 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL SEM PONTA 3 FIOS 2,5FR 90CM NITINOL;
QMSN42B4 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL SEM PONTA 4 FIOS 2,5FR 90CM NITINOL;
QMSN42B5 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL SEM PONTA 5 FIOS 2,5FR 90CM NITINOL;
QMSN43C3 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL SEM PONTA 3 FIOS 3FR 110CM NITINOL;
QMSN43C4 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL SEM PONTA 4 FIOS 3FR 110CM NITINOL;
QMSN43C5 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL SEM PONTA 5 FIOS 3FR 110CM NITINOL;
QMSN43A3 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL SEM PONTA 3 FIOS 3FR 70CM NITINOL;
QMSN43A4 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL SEM PONTA 4 FIOS 3FR 70CM NITINOL;
QMSN43A5 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL SEM PONTA 5 FIOS 3FR 70CM NITINOL;
QMSN43B3 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL SEM PONTA 3 FIOS 3FR 90CM NITINOL;
QMSN43B4 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL SEM PONTA 4 FIOS 3FR 90CM NITINOL;
QMSN43B5 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL SEM PONTA 5 FIOS 3FR 90CM NITINOL;
QMSN44C3 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL SEM PONTA 3 FIOS 4FR 110CM NITINOL;
QMSN44C4 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL SEM PONTA 4 FIOS 4FR 110CM NITINOL;
QMSN44C5 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL SEM PONTA 5 FIOS 4FR 110CM NITINOL;
QMSN44A3 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL SEM PONTA 3 FIOS 4FR 70CM NITINOL;
QMSN44A4 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL SEM PONTA 4 FIOS 4FR 70CM NITINOL;
QMSN44A5 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL SEM PONTA 5 FIOS 4FR 70CM NITINOL;
QMSN44B3 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL SEM PONTA 3 FIOS 4FR 90CM NITINOL;
QMSN44B4 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL SEM PONTA 4 FIOS 4FR 90CM NITINOL;
QMSN44B5 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL SEM PONTA 5 FIOS 4FR 90CM NITINOL;
QMSN45C3 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL SEM PONTA 3 FIOS 5FR 110CM NITINOL;
QMSN45C4 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL SEM PONTA 4 FIOS 5FR 110CM NITINOL;
QMSN45C5 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL SEM PONTA 5 FIOS 5FR 110CM NITINOL;
QMSN45A3 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL SEM PONTA 3 FIOS 5FR 70CM NITINOL;
QMSN45A4 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL SEM PONTA 4 FIOS 5FR 70CM NITINOL;
QMSN45A5 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL SEM PONTA 5 FIOS 5FR 70CM NITINOL;
QMSN45B3 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL SEM PONTA 3 FIOS 5FR 90CM NITINOL;
QMSN45B4 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL SEM PONTA 4 FIOS 5FR 90CM NITINOL;
QMSN45B5 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET HELICAL SEM PONTA 5 FIOS 5FR 90CM NITINOL;
QMSN22C3 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA SEM PONTA 3 FIOS 2,5FR 110CM NITINOL;
QMSN22C4 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA SEM PONTA 4 FIOS 2,5FR 110CM NITINOL;
QMSN22C5 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA SEM PONTA 5 FIOS 2,5FR 110CM NITINOL;
QMSN22A3 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA SEM PONTA 3 FIOS 2,5FR 70CM NITINOL;
QMSN22A4 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA SEM PONTA 4 FIOS 2,5FR 70CM NITINOL;
QMSN22A5 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA SEM PONTA 5 FIOS 2,5FR 70CM NITINOL;
QMSN22B3 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA SEM PONTA 3 FIOS 2,5FR 90CM NITINOL;
QMSN22B4 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA SEM PONTA 4 FIOS 2,5FR 90CM NITINOL;
QMSN22B5 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA SEM PONTA 5 FIOS 2,5FR 90CM NITINOL;
QMSN23C3 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA SEM PONTA 3 FIOS 3FR 110CM NITINOL;
QMSN23C4 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA SEM PONTA 4 FIOS 3FR 110CM NITINOL;
QMSN23C5 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA SEM PONTA 5 FIOS 3FR 110CM NITINOL;
QMSN23A3 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA SEM PONTA 3 FIOS 3FR 70CM NITINOL;
QMSN23A4 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA SEM PONTA 4 FIOS 3FR 70CM NITINOL;
QMSN23A5 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA SEM PONTA 5 FIOS 3FR 70CM NITINOL;
QMSN23B3 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA SEM PONTA 3 FIOS 3FR 90CM NITINOL;
QMSN23B4 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA SEM PONTA 4 FIOS 3FR 90CM NITINOL;
QMSN23B5 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA SEM PONTA 5 FIOS 3FR 90CM NITINOL;
QMSN24C3 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA SEM PONTA 3 FIOS 4FR 110CM NITINOL;
QMSN24C4 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA SEM PONTA 4 FIOS 4FR 110CM NITINOL;
QMSN24C5 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA SEM PONTA 5 FIOS 4FR 110CM NITINOL;
QMSN24A3 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA SEM PONTA 3 FIOS 4FR 70CM NITINOL;
QMSN24A4 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA SEM PONTA 4 FIOS 4FR 70CM NITINOL;
QMSN24A5 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA SEM PONTA 5 FIOS 4FR 70CM NITINOL;
QMSN24B3 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA SEM PONTA 3 FIOS 4FR 90CM NITINOL;
QMSN24B4 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA SEM PONTA 4 FIOS 4FR 90CM NITINOL;
QMSN24B5 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA SEM PONTA 5 FIOS 4FR 90CM NITINOL;

OMSN25C3 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA SEM PONTA 3 FIOS 5FR 110CM NITINOL;
OMSN25C4 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA SEM PONTA 4 FIOS 5FR 110CM NITINOL;
OMSN25C5 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA SEM PONTA 5 FIOS 5FR 110CM NITINOL;
OMSN25A3 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA SEM PONTA 3 FIOS 5FR 70CM NITINOL;
OMSN25A4 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA SEM PONTA 4 FIOS 5FR 70CM NITINOL;
OMSN25A5 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA SEM PONTA 5 FIOS 5FR 70CM NITINOL;
OMSN25B3 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA SEM PONTA 3 FIOS 5FR 90CM NITINOL;
OMSN25B4 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA SEM PONTA 4 FIOS 5FR 90CM NITINOL;
OMSN25B5 - PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO BASKET SEGURA SEM PONTA 5 FIOS 5FR 90CM NITINOL.

Modo de Uso:

O procedimento cirúrgico é a critério do médico cirurgião, a escolha do tipo de cesto e a metodologia de utilização variam de acordo com a técnica empregada. Esse produto deve ser utilizado somente por profissionais habilitados e treinados para as técnicas utilizadas.

Os cestos são usados para procedimentos de urologia. Os cestos de 2,5Fr-3Fr são recomendados para utilização em bebês e crianças, os cestos de cálculos de 3Fr a 5Fr são recomendados para utilização em adultos.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

1. Avaliar se a embalagem do produto está íntegra. **NÃO UTILIZAR SE A EMBALAGEM ESTIVER ROMPIDA;**
2. Dentro do bloco cirúrgico, em ambiente estéril, abrir a embalagem primária;
3. Inserir o instrumental através de uma camisa ou outro canal de acesso. Depois de capturar o cálculo ou corpo estranho, fechar o cesto e remover cuidadosamente;
4. Descartar o produto conforme protocolo do serviço de saúde para eliminação de resíduos contaminados.



Fabricante recomenda o uso único deste produto!

Esterilização:

O método de esterilização utilizado é óxido de etileno.

Validade:

3 anos.

Armazenamento / Transporte:

Armazenar conforme normas para produtos para saúde, em local bem ventilado, limpo e fresco, sem presença de gases corrosivos, à temperatura e umidade ambiente. Não molhar ou danificar as embalagens originais.

Não são necessários cuidados especiais no transporte, os produtos podem ser transportados a temperatura e umidade ambiente.

ATENÇÃO: Evitar exposição prolongada a luz e temperaturas elevadas.

Não exponha a temperatura acima de 54°C (130°F)

Advertências e Precauções:

- Leia atentamente todas as instruções de uso e rotulagem do produto. O produto só deve ser aplicado para o uso pretendido e de acordo com estas instruções;

- Produto de uso único recomendado. Proibido reprocessar;
- Inspeccionar a integridade da embalagem antes de usar. Não usar o produto se a embalagem estiver avariada;
- Verificar a data de validade antes do uso. Não utilizar o produto se estiver com o prazo de validade vencido;
- O produto deve ser manipulado somente por profissionais da saúde capacitados e assepticamente, seguindo os procedimentos para manipulação de produto estéril;
- Após o uso, deve ser descartado conforme protocolo do serviço de saúde para destinação de resíduos potencialmente contaminados;
- Esse produto possui níquel em sua composição. NÃO utilizar em pacientes alérgicos ao níquel;
- Se for encontrada resistência durante o avanço ou retirada do dispositivo, pare e determine a origem da resistência, pois a resistência contínua pode danificar o dispositivo e pode resultar em lesões ao paciente. Tome medidas para aliviar a resistência. Quando necessário, o uso da litotripsia pode ser necessário para reduzir a carga de pedras dentro do cesto, desde que não haja contato direto com o cesto de pedras;
- Retirar o produto para realizar procedimento de litotripsia;
- Não permitir que o produto entre em contato com qualquer instrumento eletrificado;
- Não permitir que o produto seja atingido diretamente por qualquer dispositivo de litotripsia. Isso pode danificar o produto e resultar em lesões ao paciente;
- Não permitir que o cesto entre em contato com qualquer equipamento com uso de energia;
- Alguns cálculos, estruturar ou objetos podem ser muito grandes para serem removidos endoscopicamente usando um cesto de remoção. O uso de fluoroscopia e/ou radiografia para determinar o tamanho do objeto a ser retirado é recomendado;
- Toda a equipe médica é responsável por usar a técnica apropriada e decidir sobre a indicação de uso deste dispositivo com base em sua própria experiência, treinamento e opinião médica. O médico deve ser treinado e habilitado para a realização desse tipo de cirurgia.

Contraindicações:

Não há contra-indicações para o uso do produto. As contra-indicações decorrem das restrições da ureterorenoscopia.

Efeitos Adversos:

Não há efeitos adversos para o uso do produto.

Garantia:

Os produtos fabricados pela Bhio Supply Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos S/A. são garantidos contra defeitos de fabricação.

Os produtos que comprovadamente tenham apresentado defeito serão substituídos pela Bhio Supply. Para isso, os produtos deverão ser remetidos ao departamento de assistência técnica da Bhio Supply, acompanhados da descrição do defeito apresentado. Caso o produto estiver contaminado, o mesmo deve ser limpo e desinfetado antes do envio.

A garantia será invalidada caso seja verificado que o produto foi sujeito a manuseio inadequado.

Assistência Técnica:

A Bhio Supply presta assistência técnica para todos os seus produtos. Os canais de contato para assuntos relacionados a Assistência Técnica são os seguintes:

e-mail: assistencia@bhiosupply.com.br

Fone: +55 51 3459 4000

Endereço:

Av. Luiz Pasteur, N° 4959 – Esteio – RS – Brasil

CEP: 93.290.010

Fabricante Legal:

Bhio Supply Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos S/A.

CNPJ: 73.297.509/0001-11

Endereço:

Av. Luiz Pasteur, N°4959 – Esteio/RS - Brasil

Telefone/Fax: 55 51 3473-7450 / 3458-4479

Telefone SAC: 55 51 3459-4000

www.bhiosupply.com.br

Responsável Técnico:

Jaqueline Timm – CRF/RS 10514

Unidade Fabril:

Bhio Supply Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos S/A.

CNPJ: 73.297.509/0001-11

Endereço:

Av. Luiz Pasteur, N°4959 – Esteio/RS - Brasil

Telefone/Fax: 55 51 3473-7450 / 3458-4479

Telefone SAC: 55 51 3459-4000

www.bhiosupply.com.br

Responsável Técnico:

Jaqueline Timm – CRF/RS 10514